



# ESCALABILIDAD DEL COVID-19

## DETECCIÓN DE ANTICUERPOS

### CON PANBIO™ COVID-19

### IgG/IgM RAPID TEST DEVICE

## HACER PRUEBAS ES MUCHO MÁS ACCESIBLE


- Los tests de detección de anticuerpos son importantes para confirmar que se ha producido una infección
- Rápida capacidad de escalabilidad
- Tiempo de respuesta: 10-20 minutos
- Tipos de muestra de sangre entera de punción digital, muestra de sangre entera venosa o muestra de suero/ plasma
- Tests descentralizados que permite aliviar la saturación de hospitales
- Útil en pruebas de coronavirus desde el automóvil o “*Drive-Thru*”, en consultas a domicilio, en los servicios de atención de salud o en los laboratorios.




# PROCEDIMIENTOS DEL TEST DE PUNCIÓN DIGITAL

Consulte el prospecto informativo para conocer el procedimiento completo


1 PUNCIONE EL DEDO CON LA LANCETA ESTERILIZADA

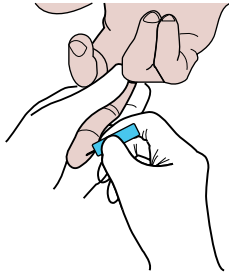

2 AÑADIR 20 µL DE LA MUESTRA


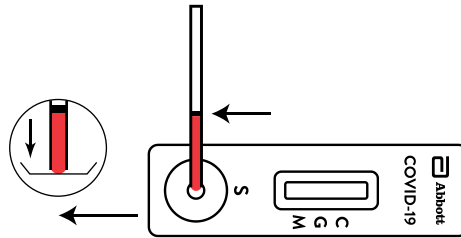


3 AGREGUE 2 GOTAS DE LA SOLUCIÓN TAMPÓN

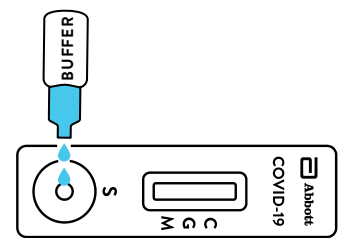

4 HAGA LA LECTURA DE LOS RESULTADOS EN 10 MINUTOS

NO LEER DESPUÉS DE 20 MINUTOS

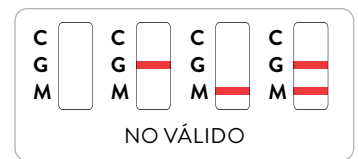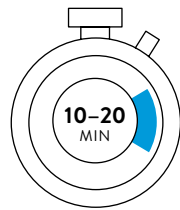

## ESPECIFICACIONES

**USO PREVISTO:** Rápido test diagnóstico *in vitro* para la detección rápida y cualitativa de anticuerpos IgG e IgM inducidos por la presencia de SARS-CoV-2 en muestras de suero, plasma humano, en muestras de sangre entera venosa y de punción digital. Test exclusivo para uso profesional. El test será usado como una ayuda en el diagnóstico de SARS-CoV-2. El producto puede ser utilizado en cualquier ambiente de laboratorio y no laboratorio que cumpla los requisitos especificados en el Prospecto Informativo y en la regulación local. El test solo ofrece resultados preliminares. Los resultados negativos no excluyen la infección por SARS-CoV-2, y no pueden ser usados como la única base para el tratamiento u otras decisiones en el manejo de la enfermedad. El test no fue creado para ser usado como screening del donante para SARS-CoV-2.

- **TIEMPO DEL TEST:** 10–20 minutos
- **CONSERVACIÓN:** 2°C–30°C
- **MARCA CE**
- **TIPO DE MUESTRA:** Sangre entera de punción digital, sangre entera venosa o suero/plasma

- **VOLUMEN DE MUESTRA:**
  - 20 µL de muestra de sangre de punción digital o de sangre entera de venopunción
  - 10 µL de suero o plasma

- **SENSIBILIDAD Y ESPECIFICIDAD:**
  - SANGRE ENTERA PUNCIÓN DIGITAL**  
Sensibilidad: 96.2%  
Especificidad: 100.0%
  - SANGRE ENTERA VENOPUNCIÓN**  
Sensibilidad: 96.0%  
Especificidad: 95.8%
  - PLASMA**  
Sensibilidad: 97.8%  
Especificidad: 92.8%

## INFORMACIÓN DEL PEDIDO

- **NUMERO DE CATÁLOGO:** ICO-T402
- **CANTIDAD:** 25 tests/kit
- **CONTENIDO:** 25 Dispositivos de test, 25 Pipetas de transferencia para espécimen, 1 Solución tampón de detección (3 ml), 1 Prospecto informativo

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN, PÓNGASE EN CONTACTO CON SU REPRESENTANTE LOCAL O VISITE [WWW.POC-COVID.ABBOTT](http://WWW.POC-COVID.ABBOTT)

Este producto no está disponible en todos los países. No está a la venta en los Estados Unidos.