



PRUEBA RÁPIDA DE TOXICOLOGÍA

SOLUCIONES COMPLETAS DE PRUEBAS
TOXICOLÓGICAS PARA SUS NECESIDADES

NO TODOS LOS PRODUCTOS ESTÁN
DISPONIBLES EN TODAS LAS REGIONES


Abbott

NUESTRO LEGADO

Durante más de 130 años, Abbott se ha adaptado a un entorno de cuidado de la salud cada vez mas complejo, manteniendo el enfoque de atención en el lugar que le corresponde: ayudar a las personas a conseguir la mejor salud posible, en todas las etapas de la vida, en todo el mundo. Y ese es un objetivo que seguiremos persiguiendo en el futuro.

1880s El Dr. Wallace Abbott utilizó ciencia avanzada para mejorar la precisión y la eficacia de los medicamentos.

De 1930 a 1960 Abbott expandió su alcance médico hacia las vitaminas y, más tarde, hacia la fórmula para bebés, lo que marcó décadas de desarrollo en la nutrición.

De 1970 a 1980 Pioneros en la industria de diagnóstico moderna mediante innovadores sistemas y pruebas.

De 1990 a los 2000 Aumenta su enfoque en los dispositivos médicos para brindar una innovación sin precedentes.

EN LA ACTUALIDAD Abbott continúa creando nuevas formas de proporcionar salud a las personas en todo el mundo, ofreciendo una amplia gama de productos que pueden ayudar a todos los miembros de su familia a vivir mejor.



UN LÍDER MUNDIAL EN PRUEBAS TOXICOLÓGICAS Y PRUEBAS RÁPIDAS EN EL PUNTO DE CUIDADO

Nuestra gama de productos para realizar pruebas de alcohol y drogas ofrece a los clientes productos de alta calidad que proporcionan información confiable y verificable; además, aportan valor en una gran variedad de entornos.

Abbott es líder mundial en servicios de toxicología y proporciona resultados integrales de las pruebas de detección de drogas que se llevan a cabo en la actualidad. Nuestra tecnología innovadora, los expertos de la industria y los datos detallados permiten tomar decisiones con confianza.



SERVICIOS GLOBALES CON
PRUEBAS TOXICOLÓGICAS
Y LABORATORIOS
ESPECIALIZADOS



LÍDER MUNDIAL EN
PRUEBAS TOXICOLÓGICAS
Y PRUEBAS RÁPIDAS EN EL
PUNTO DE ATENCIÓN



ORINA


ABON™ MULTI-DRUG ONE STEP SCREEN TEST DEVICE

ABON Multi-Drug One Step Screen Test Device proporciona una rápida detección de drogas y metabolitos.

Solo se necesita una pequeña cantidad de muestra de orina para que el dispositivo proporcione resultados en cinco minutos. Con un proceso fácil de seguir, ABON Multi-Drug One Step Screen Test Device está disponible en configuraciones para detectar una o múltiples drogas.

CARACTERÍSTICAS


- Amplia gama de configuraciones disponibles para un programa de análisis de orina totalmente personalizado
- Entre las opciones disponibles de prueba de detección toxicológica, se incluyen las siguientes: AMP, BAR, BUP, BZO, COC, COT, EDDP, FTY, HRN, K2, KET, MDMA, MET, MOP, MPH, MQL, MTD, OPI, OXY, PCP, PPX, TCA, THC y TRA
- Es fácil de utilizar, fácil de interpretar y proporciona resultados en cinco minutos
- Requiere volumen mínimo de muestra (100µL)

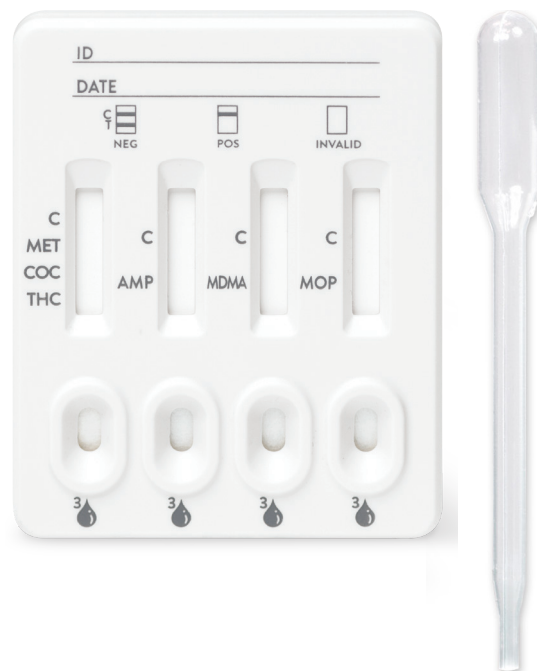

La presentación del producto puede variar.

TEST PROCEDURE AND INTERPRETATION

1 Agregue 3 gotas de orina (aproximadamente 100µl)

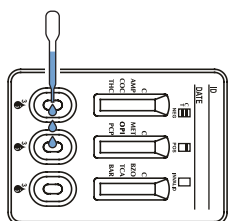

2 Interprete los resultados al transcurrir 5 minutos



Acorde a las instrucciones de uso, no interprete los resultados después de 10 minutos de realizar la prueba.

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

NEGATIVO



POSITIVO



NO VÁLIDO



ABON™ MULTI-DRUG ONE STEP SCREEN TEST PANEL

ABON Multi-Drug One Step Screen Test Panel detecta rápidamente una amplia gama de drogas.

Los dispositivos son fáciles de utilizar y cuentan con una amplia gama de configuraciones a fin de proporcionar un programa de análisis totalmente personalizado. ABON Multi-Drug One Step Screen Test Panel está disponible en configuraciones para detectar múltiples drogas.


CARACTERÍSTICAS

- Amplia gama de configuraciones disponibles para proporcionar un programa de análisis de orina totalmente personalizado
- Entre las opciones disponibles de prueba de detección toxicológica, se incluyen las siguientes: AMP, BAR, BUP, BZO, COC, COT, EDDP, FTY, HRN, K2, KET, MDMA, MET, MOP, MPH, MQL, MTD, OPI, OXY, PCP, PPX, TCA, THC y TRA
- Entre las combinaciones de verificación de adulteración de la muestra, (adulteration test – SVT) se incluyen las siguientes: creatinina (CRE), glutaraldehído (GLUT), nitritos (NIT), oxidantes/clorocromato de piridinio (OX/PCC), pH y gravedad específica (S.G.)
- Procedimiento sencillo: obtenga la muestra orina, sumérjala y lea los resultados a los cinco minutos
- El administrador sigue con el control del dispositivo de prueba



PROCEDIMIENTO DE PRUEBA E INTERPRETACIÓN

- 1 Retire la tapa del panel y sumerja las tiras en la muestra por un mínimo de 10 a 15 segundos

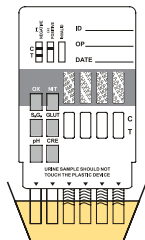

- 2 Interprete los resultados al transcurrir 5 minutos



No interprete los resultados después de 10 minutos de realizar la prueba

Nota: Para paneles con tiras de adulteración, interprete los resultados entre 3 y 5 minutos acorde a las instrucciones de uso.

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

NEGATIVO



POSITIVO



NO VÁLIDO



ABON™ ONE STEP DRUG SCREEN TEST STRIP

ABON One Step Drug Screen Test Strip detecta rápidamente la presencia de drogas.

Los dispositivos son fáciles de utilizar y cuentan con una amplia gama de opciones a fin de proporcionar un programa de análisis totalmente personalizado. Las ABON One Step Drug Screen Test Strips están disponibles en configuraciones para detectar una sola droga.


CARACTERÍSTICAS

- Entre las opciones disponibles de prueba de detección toxicológica, se incluyen las siguientes: AMP, BAR, BUP, BZO, COC, EDDP, FTY, HRN, KET, MDMA, MET, MOP, MPH, MQL, MTD, NIM, OPI, OXY, PCP, PPX, TCA, THC y TRA
- Procedimiento sencillo: obtenga la muestra orina, sumérjala y lea los resultados a los cinco minutos
- El administrador sigue con el control del dispositivo de prueba



PROCEDIMIENTO DE PRUEBA E INTERPRETACIÓN

- 1** Sumerja la tira en la muestra por un mínimo de 10 a 15 segundos

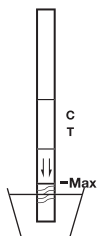


- 2** Interprete los resultados al transcurrir 5 minutos



Acorde a las instrucciones de uso, no interprete los resultados después de 10 minutos de realizar la prueba.

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS


NEGATIVO

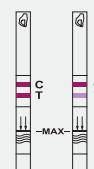

POSITIVO



NO VÁLIDO

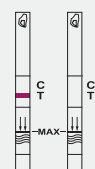

ABON™ MULTI-DRUG ONE STEP MULTI-LINE SCREEN TEST PANEL WITH INTEGRATED E-Z SPLIT KEY™ CUP II

ABON Multi-Drug One Step Multi-Line Screen Test Panel with Integrated E-Z Split Key Cup II es un dispositivo de detección de drogas en la orina todo incluido que se puede utilizar in situ. Simplifica el proceso de obtención y las pruebas de detección de hasta 12 drogas.

El recipiente independiente de obtención de orina minimiza la exposición a la orina de la persona que obtiene la muestra, mientras que el dispositivo proporciona resultados rápidos y confiables en un plazo de cinco minutos, los cuales se pueden fotocopiar para el registro de resultados. También hay disponibles tiras de prueba de adulteración.



CARACTERÍSTICAS

- El recipiente de pruebas integrado puede detectar entre 2 y 12 drogas: AMP, BAR, BUP, BZO, COC, COT, EDDP, FTY, KET, MDMA, MET, MOP, MTD, OPI, OXY, PCP, PPX, TCA, THC y TRA
- Entre las combinaciones de verificación de adulteración de la muestra, (adulteration test – SVT) se incluyen las siguientes: creatinina (CRE), glutaraldehído (GLUT), nitritos (NIT), oxidantes/clorocromato de piridinio (OX/PCC), pH y gravedad específica (S.G.)
- El recipiente de obtención individual y la prueba ayudan a minimizar la exposición a la orina
- Procedimiento sencillo: los resultados se pueden interpretar a los cinco minutos



PROCEDIMIENTO DE PRUEBA E INTERPRETACIÓN

- 1** Obtenga la muestra en el recipiente, cierre la tapa e inserte la llave

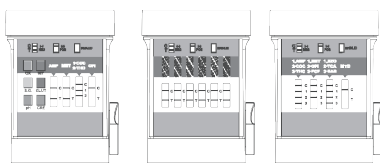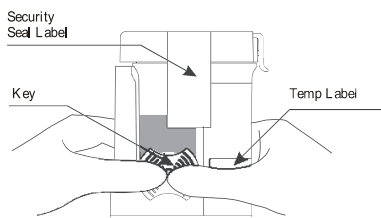

- 2** Interprete los resultados al transcurrir 5 minutos



Los resultados de la tira reactiva de drogas se mantienen estables por hasta 60 minutos

Nota: Para paneles con tiras de adulteración, interprete los resultados entre 3 y 5 minutos acorde a las instrucciones de uso.

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

NEGATIVO



POSITIVO



NO VÁLIDO



FLUIDO ORAL

ABON™ MULTI-DRUG MULTI-LINE TWIST SCREEN TEST DEVICE

ABON Multi-Drug Multi-Line Twist Screen Test Device detecta rápidamente una variedad de drogas en el fluido oral.



Los dispositivos son fáciles de utilizar y cuentan con una variedad de configuraciones a fin de proporcionar un programa de análisis personalizado. ABON Multi-Drug Multi-Line Twist Screen Test Device está disponible en configuraciones para detectar diversas drogas.

CARACTERÍSTICAS

- Entre las opciones disponibles de prueba de detección toxicológica, se incluyen las siguientes: AMP, BZO, COC, MET, MTD, OPI, OXY, PCP y THC
- Procedimiento sencillo: obtenga una muestra de fluido oral, inserte el recipiente de obtención siguiendo los pasos y lea los resultados a los nueve minutos




CÓMO OBTENER UNA MUESTRA

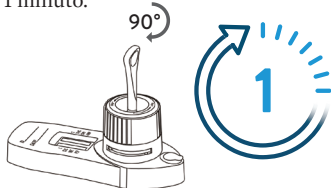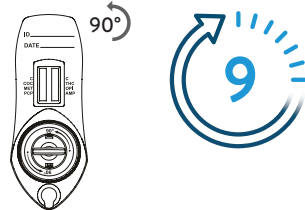
- 1** Obtenga la muestra de fluido oral con una esponja 
- 2** Introduzca el colector en el dispositivo de prueba presionándolo hacia el interior de la cámara colectora, luego gírelo hacia la derecha hasta que encaje en su sitio y espere 1 minuto. 
- 3** Después de 1 minuto, gire la cámara colectora hacia la izquierda e interprete los resultados a los 9 minutos, como lo indican las instrucciones de uso. 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS


POSITIVO A COC /MET/
PCP/OPI

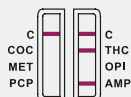

NEGATIVO

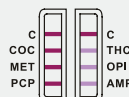

NO VÁLIDO

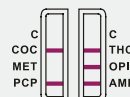

PREGUNTAS FRECUENTES

PREPARACIÓN DE LA PRUEBA

¿Qué tipo de muestra es elegible?

La mejor muestra de orina o fluido oral es la que se toma en el lugar de recolección, clara y no adulterada. Se debe evitar comer, beber, fumar y masticar chicle durante un mínimo de 10 minutos antes de la recogida de la muestra de fluido oral.

¿Pueden analizarse las muestras de orina congeladas tras su descongelación?

Las muestras de orina congeladas deben descongelarse y mezclarse bien antes de realizar la prueba.

PROCESO DE ANÁLISIS

¿Se pueden colocar tiras reactivas y tarjetas de inmersión directamente en la muestra de orina?

Sumerja las tiras reactivas en la orina hasta por lo menos las líneas onduladas, pero no por encima de las flechas; si utiliza una tarjeta de inmersión, deberá retirar la tapa. Coloque la tira reactiva o la tarjeta de inmersión en una superficie plana no absorbente, ponga en marcha el temporizador y espere a que aparezcan las líneas de color; si utiliza una tarjeta de inmersión, sustituya primero la tapa.

¿Beber mucho líquido antes de realizar una prueba puede afectar el resultado?

Sí. Si se ingieren grandes cantidades de líquido poco antes de una prueba de drogas, existe el riesgo de que la muestra de orina se diluya y, por tanto, cualquier droga presente quede por debajo del nivel de detección de la prueba. Esto conducirá a un resultado falso negativo de la prueba.

LECTURA DE LOS RESULTADOS

¿Es un factor importante que las líneas de prueba de los dispositivos de prueba ABON se vean diferentes?

No. Una línea de color en la región de la línea de control (C) y una línea de color en la región de la línea de prueba (T) para una droga específica indican que el resultado es negativo. El tono del color en la región de prueba (T) puede variar, pero debe considerarse negativa siempre que haya una línea de color, aunque esta sea tenue.

¿Debo utilizar otro dispositivo de prueba ABON si no estoy seguro de la respuesta?

No. Todas las pruebas con el mismo número de lote mostrarán los mismos resultados. Si no está seguro del resultado u obtiene un resultado positivo cuando el sujeto de la prueba niega haber consumido la droga, la muestra debe enviarse a un laboratorio para que se realicen pruebas de confirmación.

¿Puedo obtener resultados diferentes en una prueba de múltiples drogas ABON y en una sola prueba?

Sí, si la orina contiene drogas en concentraciones cercanas al nivel de corte. En caso de dudas, la muestra se debe enviar al laboratorio para realizar pruebas de confirmación.

¿El consumo de semillas de amapola puede generar un resultado positivo en el dispositivo de prueba ABON para la morfina?

Sí, pero solo en niveles razonablemente bajos. Cualquier muestra de prueba positiva para opiáceos o morfina que sea potencialmente atribuible a las semillas de amapola se debe enviar al laboratorio para que se realicen pruebas de confirmación.

¿Pueden obtenerse resultados diferentes en los dispositivos de prueba ABON y en los análisis de laboratorio?

Sí. Los resultados del análisis siempre se basan en la sensibilidad del método y el nivel de corte de la droga. En el caso de un resultado de detección positivo analizado mediante una prueba rápida, recomendamos solicitar una prueba de confirmación a un laboratorio para obtener la confirmación de la droga específica presente.

¿El cliente puede manipular la muestra si consume, por ejemplo, limón?

No. Es poco probable que el consumo de algún alimento afecte el resultado de una prueba. Sin embargo, recomendamos que se realice una prueba de confirmación de laboratorio en el caso de cualquier muestra en la que los resultados de la prueba de detección no sean claros.

¿Por qué una prueba de detección inicial en un dispositivo de prueba ABON podría ser positiva y, luego, negativa después de una prueba de confirmación de laboratorio?

En todas las pruebas de detección existe el riesgo de que se produzca una reacción cruzada. Esto significa que en la prueba se detectan otros elementos en la orina (por ejemplo, un medicamento de venta libre) que son similares a la droga que se está analizando, pero que no son de naturaleza ilícita. Además, otras sustancias pueden generar resultados positivos en las pruebas, por lo que imitarían la reacción a la droga que se está analizando. Adicionalmente, tras una prueba de confirmación de laboratorio más sensible, se puede identificar la sustancia alternativa y confirmar que la prueba de drogas es negativa. Por esta razón, recomendamos que se envíe una muestra de orina con resultado positivo al laboratorio para realizar una prueba de confirmación.

ALMACENAMIENTO DEL DISPOSITIVO

¿El producto se debe refrigerar?

Almacene el producto tal y como se indica en la bolsa sellada e inserto del producto. Los productos de orina pueden almacenarse a temperatura ambiente o refrigerados a 2 °C-30 °C y los productos de fluido oral pueden almacenarse a 4 °C-30 °C. No congelar los productos.

¿Por cuánto tiempo se puede utilizar el producto después de abrirlo?

El producto debe permanecer en la bolsa sellada hasta su uso y debe utilizarse tan pronto como sea posible una vez que se retire de la bolsa sellada.

¿Puedo utilizar el producto si ha caducado?

El producto no debe utilizarse después de su fecha de vencimiento.

MEJORAR LA VIDA CON PRODUCTOS Y SERVICIOS DE PRUEBAS DE DETECCIÓN TOXICOLÓGICA

Con una amplia gama de soluciones de pruebas de detección toxicológicas y de salud que tienen el fin de satisfacer necesidades únicas, equipamos a nuestros clientes a fin de comprender y promover la seguridad y el bienestar de cada persona.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ABREVIATURA DE LA DROGA	
ABREVIATURA	NOMBRE DE LA DROGA
AMP	Anfetamina
BAR	Barbitúricos
BUP	Bupernorfina
BZO	Benzodiazepinas
COC	Cocaína
COT	Cotinina
EDDP	Metabolito de metadona
FTY	Fentanilo
HRN	Heroína
KET	Ketamina
MDMA	Éxtasis
MET	Metanfetamina
MOP	Morfina
MPH	Metilfenidato
MQL	Metacualona
MTD	Metadona
NIM	Nimetazepam
OPI	Opiáceos
OXY	Oxicodona
PCP	Fenciclidina
PPX	Propoxifeno
K2	Cannabinoides sintéticos
TCA	Antidepresivo tricíclico
THC	Marihuana o cannabis
TRA	Tramadol

COMUNÍQUESE CON UN REPRESENTANTE DE ABBOTT
TOXICOLOGY.ABBOTT

